



TECHNISCHES DATENBLATT

Corona Sars-CoV-2 Pandemie Atemschutzmaske

Eigenschaften

Partikelfiltrierende Faltmaske ohne Ventil

5-lagiger Fließstoff

Hohe Filterleistung

Geringer Atemwiderstand

Langanhaltender Tragekomfort

Weiche und elastische Ohrschlaufen

Flexibler, eingenähter Nasenbügel mit festem Sitz

Entspricht den Anforderungen zur Nutzung zum Infektionsschutz durch medizinisches- und Pflegepersonal

r+k Global Trade GmbH
Sirius Business Park
Kimplerstr. 288
D-47807 Krefeld
Deutschland

T +49 (0)2151 82067 80
F +49 (0)2151 82067 89
E info@rk-globaltrade.de



Anwendungen

- Infektionsschutz gemäß MedBVSV
- Gewerbliche und private Nutzung
- Nutzung zum Infektionsschutz durch medizinisches- und Pflegepersonal im Kampf gegen das Coronavirus

Verpackungsinhalt : 20 Stück


Art.-Nr. : 20-1002 (AP-002)

EAN-Nr. : 425189410021


Zertifizierungen

Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Rev. 2

- Filterleistung mit Prüfaerosol NaCl $\geq 94\%$ ¹
- Geringer Atemwiderstand³
- Dichtsitz am Gesicht
- Tragekomfort
- Keine Einschränkung im Sichtfeld
- Leicht an- und ablegbar
- Kräftige Kopfbänderung
- Nasenbügel schafft festen Sitz, auch nach mehrmaligem An- und Absetzen
- Kein Lösen von Partikeln oder Fasern vor und nach mechanischer Beanspruchung²
- Kein starker Eigengeruch
- Sicherheit der Verbindungen
- Verpackung schützt vor mechanischer Beschädigung und Verunreinigung vor dem Gebrauch
- Prüfung erfolgt durch Prüflabor **ift Rosenheim**

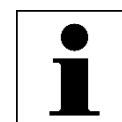

Keine Zulassung nach PSA Verordnung (EU) 2016/425. Verwendung nur in Zusammenhang mit der Sars-CoV-2 Pandemie.

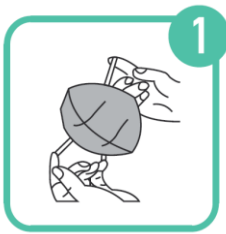

Anwendungshinweise:

Anlegen der Maske

1. Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und falten Sie sie vollständig auf.
2. Halten Sie die Maske so, dass der Nasenklipp nach oben zeigt und prüfen Sie die Maske optisch auf Beschädigung.
3. Platzieren Sie die Maske – mit dem Kinn beginnend – über Mund und Nase und fixieren Sie die Haltebänder hinter Ihren Ohren.
4. Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel Ihrer Nasenform an, um einen guten und sicheren Sitz zu erreichen.
5. Prüfen Sie den Dichtsitz der Maske:
 - Maske vorsichtig mit beiden Händen bedecken.
 - Stark ausatmen.
 - Bei Leckage am Nasenbereich, wiederholen Sie Schritt 4.
 - Bei Leckage am Maskenrand, passen Sie den Sitz der Haltebänder an.
 - Wenn Sie keinen richtigen Dichtsitz erreichen können, betreten Sie nicht den Gefahrenbereich.
6. Zum Ablegen, die Maske an den Haltebändern greifen und - nach unten und nach vorne gebeugt - vom Gesicht wegziehen.

Hinweise

- Waschen Sie sich die Hände vor und nach dem Tragen der Maske.
- Beschädigte Halbmasken sowie Halbmasken aus beschädigter Verpackung nicht benutzen.
- Verwenden Sie die Maske nicht in Umgebungen mit weniger als 19.5% Sauerstoff.
- Nationale Vorschriften beachten!
- Den Gefahrenbereich sofort verlassen, wenn das Atmen schwerfällt oder wenn Sie Angstgefühle oder Schwindel verspüren.
- Die Halbmaske nicht verändern oder manipulieren.
- Die Halbmaske nach jedem einzelnen Gebrauch entsorgen.
- Einweg. Nicht wiederverwenden.
- Halbmasken kühl und trocken lagern. Lagertemperaturbereich -20°C bis 38°C und Max. relative Luftfeuchtigkeit für Lagerung 80%.
- Verwendung nur in Zusammenhang mit der Corona SARS-Cov-2 Pandemie.

WARNUNG

Die Halbmasken sind nur für die beschriebene Verwendung bestimmt. Fehlanwendungen können zu Krankheit oder Tod führen.



www.procare-germany.eu